



QUEEN'S CLEANER M

PROPRIETA'

Le lenti a contatto morbide necessitano quotidianamente di un'accurata e profonda detersione. La soluzione Queen's Cleaner M ha un alto potere detergente. Molecole tensioattive, associate a polimeri altamente idratanti, ripristinano l'idratazione e la bagnabilità delle lenti morbide, conferendo un ottimo comfort e una migliore biotollerabilità.

COMPOSIZIONE

EDTA 0.02%, Potassio Sorbato 0.3%/100ml

FORMATO

Flacone da 60ml

ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare e risciacquare accuratamente le mani. Rimuovere la lente dall'occhio, posarla sul palmo della mano e versare alcune gocce di Queen's Cleaner M sulla superficie. Sfregare delicatamente la lente con il dito, con un movimento verticale (in avanti e in dietro) per alcuni secondi. Al fine di rimuovere completamente i depositi superficiali, risciacquare abbondantemente e accuratamente la lente con Queen's Unica, Queen's Uniyal oppure con Queen's Saline e poi procedere alla disinfezione. Ripetere la procedura sopra descritta per l'altra lente. Porre le lenti nell'apposito contenitore portalenti con Queen's Unica. Prima di applicarle negli occhi, risciacquarle con Queen's Saline.

PRECAUZIONI

Il flacone di Queen's Cleaner M una volta aperto deve essere utilizzato entro 3 mesi. L'eventuale residuo deve essere eliminato. Chiudere il flacone dopo l'uso. Conservare il flacone lontano da fonti di calore e comunque tra 5°C e 30°C. Per evitare contaminazioni, non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie. Non usare se il sigillo non è integro, in quanto non è garantita la sterilità del prodotto.

INDICAZIONI

La soluzione Queen's Cleaner M è indicata per la detersione di tutte le lenti a contatto morbide e colorate/cosmetiche.

CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente. avvertenze: Tenere lontano dalla portata dei bambini. **NON INGERIRE.** Non utilizzare mai acqua del rubinetto. Usare sempre Queen's Saline, Queen's Unica o Queen's Uniyal. Consultare lo specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti.

COMPLICANZE

In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultate lo specialista. Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e/o astuccio.