

## Svegliatevi con una perfetta visione usando il trattamento

### PARAGON CRT

#### **La comodità che stavate cercando.**

Niente più lenti a contatto, niente più occhiali, niente più fastidi per occhi secchi. Il trattamento Paragon CRT pone fine a tutto questo. Sia che stiate praticando sport, lavorando in un ambiente sporco o ventoso, o semplicemente vi stiate truccando, con il trattamento CRT niente sarà tra voi ed una eccellente visione. Dovrete solo applicare le lenti terapeutiche durante il sonno e toglierle al risveglio, niente di più semplice. E dato che potrete interrompere il trattamento in qualsiasi momento senza nessuna variazione permanente ai vostri occhi, avrete il pieno controllo e la massima flessibilità di scelta per la vostra correzione visiva.

#### **Un futuro chiaro.**

Prova a vivere senza occhiali e senza lenti a contatto. Rivolgiti ad uno dei centri autorizzati CRT che trovi sul sito internet [www.soleko.it](http://www.soleko.it) e chiedi se il trattamento Paragon CRT è adatto a te. Assicurati di chiedere Paragon CRT, il primo sistema approvato dalla FDA americana per il modellamento corneale con uso notturno, con la garanzia di trovare sulle lenti terapeutiche il marchio laser che ne certifica l'autenticità. Perché la prossima volta che chiuderai gli occhi, potrai riaprirli e vedere un mondo nuovo.

Vi siete appena svegliati da una riposante notte. Ma appena svegli, notate qualcosa di diverso. Potete vedere senza gli occhiali o le lenti a contatto. E non avete subito un intervento chirurgico. Bene, non state sognando. State solo sperimentando il nuovo trattamento corneale denominato CRT, la correzione notturna che permette la libertà dagli occhiali e dalle lenti a contatto per tutto il giorno senza intervento chirurgico.

#### **Risultati garantiti.**

Il trattamento Paragon CRT utilizza delle speciali lenti terapeutiche che in maniera delicata e temporanea rimodellano la cornea mentre dormite. Attraverso una intensa ricerca scientifica e test clinici, il trattamento Paragon CRT è stato provato essere sicuro ed efficace per pazienti di tutte le età quando utilizzato durante la notte, ottenendo l'approvazione FDA americana e il marchio CE per l'utilizzo notturno. Il risultato è che avrete una visione perfetta per l'intero arco della giornata, senza le lenti mentre siete svegli, e con le lenti indossate mentre dormite, correggendo miopia associata ad astigmatismo.

#### **Cosa è PARAGON CRT?**

Paragon CRT è una lente a contatto terapeutica permeabile all'ossigeno usata nella Terapia Corneale Rifrattiva (CRT - Corneal Refractive Therapy)

#### **Cos'è la CRT?**

La Terapia Corneale Rifrattiva è un metodo non chirurgico tecnologicamente avanzato che permette di rimodellare la cornea durante il sonno. Al risveglio si rimuove la lente e si è in grado di affrontare la giornata senza l'utilizzo di alcun tipo di correzione.

**Il metodo CRT è nuovo?**

Mentre il metodo di rimodellamento della cornea attraverso le lenti a contatto non è nuovo (ortocheratologia), Paragon CRT è il primo sistema, con sicurezza ed efficacia provata, ad avere ottenuto la certificazione FDA per la Terapia Corneale Rifrattiva notturna.

**La CRT è una soluzione permanente?**

No. È temporanea. Se si interrompe l'applicazione della lente la vista tornerà al suo stato iniziale in meno di 72 ore.

**Paragon CRT può essere utilizzato da tutti?**

Non tutti possono utilizzare Paragon CRT. Queste lenti terapeutiche sono state progettate per persone con bassa o moderata miopia (fino a -6.00 diottrie) con o senza astigmatismo (fino a -1.75 diottrie). Non ci sono restrizioni di età per il metodo Paragon CRT, che rappresenta una grande possibilità per tutta la famiglia. In ogni caso, viste le personali caratteristiche fisiologiche e le necessità visive di ogni paziente, la decisione per l'utilizzo della CRT può essere presa solo dopo un accurato esame dell'occhio e le indicazioni di un professionista di fiducia.

**Quanto tempo è necessario per raggiungere e mantenere una buona visione durante le ore diurne?**

La maggior parte dei pazienti registrano un rapido miglioramento sin dai primi giorni di trattamento e raggiungono una visione ottimale entro 7 o 14 giorni.

**Cosa bisogna fare per vedere adeguatamente nel periodo che intercorre tra l'inizio della terapia e il raggiungimento del risultato finale?**

Durante questo periodo transitorio, si può indossare la lente Paragon CRT per parte della giornata o utilizzare lenti a contatto morbide provvisorie. Il vostro specialista di fiducia vi suggerirà l'opzione più adatta al vostro caso.

**Quali sono i rischi connessi all'uso delle lenti Paragon CRT?**

L'applicazione di qualsiasi tipo di lente comporta una possibilità minima di rischio. Dagli studi clinici effettuati per l'approvazione FDA non sono comunque emersi seri effetti indesiderati.

**È possibile vedere quando si indossano le lenti Paragon CRT ?**

Sì. Una importante caratteristica delle lenti Paragon CRT è che consentono di vedere perfettamente sia quando indossate sia quando rimosse.

**Ogni quanto bisogna sostituire le lenti Paragon CRT?**

Generalmente è necessario sostituirle ogni anno.

**Che tipo di manutenzione richiedono?**

Le lenti vanno disinfettate dopo ogni utilizzo. Il vostro contattologo vi fornirà tutte le istruzioni necessarie per prendervi cura delle vostre lenti.