

## QUEEN'S CONDITIONER R 250 ML

### PROPRIETA'

La soluzione Queen's Conditioner R ha un'elevata azione disinfettante, ha un pH compatibile con i tessuti e con i liquidi organici oculari con cui viene a contatto.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare e risciacquare accuratamente le mani. rimuovere la lente dall'occhio, posarla sul palmo della mano e versare alcune gocce di Queen's Cleaner R sulla superficie. Sfregare delicatamente la lente con il dito, con un movimento verticale (in avanti e in dietro) per alcuni secondi. Al fine di rimuovere completamente i depositi superficiali, risciacquare abbondantemente e accuratamente la lente con Queen's Salina. ripetere la procedura sopra descritta per l'altra lente. riempire il contenitore con la soluzione Queen's Conditioner R. Chiudere accuratamente il contenitore portalenti e lasciare immerse le lenti per almeno 4 ore o per tutta la notte. Prima di applicare le lenti negli occhi, risciacquarle con Queen's Salina.

### PRECAUZIONI

Il flacone di Queen's Conditioner R una volta aperto deve essere utilizzato entro 2 mesi. L'eventuale residuo deve essere eliminato. Chiudere il flacone dopo l'uso. Conservare il flacone lontano da fonti di calore e comunque tra 5°C e 30°C. Per evitare contaminazioni, non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie. Non usare se il sigillo non è integro, in quanto non è garantita la sterilità del prodotto. Se le lenti rimangono nella stessa soluzione per più di 7 giorni, ripetere la procedura della detersione con Queen's Conditioner R. Dopo la disinfezione, risciacquare il contenitore portalenti e lasciarlo asciugare all'aria. Sostituire il contenitore portalenti ogni mese per diminuire il rischio di una sua contaminazione e quindi delle lenti. Non togliere i tappi del contenitore portalenti durante la disinfezione delle lenti. eliminare sempre la soluzione rimasta dentro il contenitore portalenti.

### INDICAZIONI

La soluzione Queen's Conditioner R è indicata per la disinfezione di tutte le lenti a contatto rigide gas-permeabili.

### CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente.

### AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. **NON INGERIRE.** Non utilizzare mai acqua del rubinetto per il risciacquo delle lenti, usare sempre la Queen's Unica, Queen's UniYal o Queen's Saline. Consultare lo specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti.

### COMPLICANZE

In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultate lo specialista. Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e/o astuccio.