

QUEEN'S PEROXIDE 360 ML

PROPRIETA'

La soluzione Queen's Peroxide ha un elevato potere battericida, svolge anche un'azione di deterzione rimuovendo i depositi che quotidianamente si formano sulle superfici delle lenti a contatto.

ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare e risciacquare accuratamente le mani. Utilizzare sempre e solo l'apposito contenitore dotato di catalizzatore metallico. Riempire il contenitore con soluzione Queen's Peroxide ponendo attenzione a non superare la tacca di riferimento. Porre le lenti nell'apposito contenitore portalenti e immergerlo nel Queen's Peroxide. Chiudere il contenitore evitando di agitarlo. Mantenere il contenitore in posizione verticale.

La corretta funzionalità del prodotto è riconoscibile dalla formazione di bollicine di ossigeno generate dal contatto tra soluzione e catalizzatore di metallo. In caso contrario non utilizzare il prodotto. Lasciare le lenti in soluzione Queen's Peroxide per almeno 6 ore o per tutta la notte. Prima di applicarle negli occhi, risciacquarle con Queen's Saline.

PRECAUZIONI

Il flacone di Queen's Peroxide una volta aperto deve essere utilizzato entro 2 mesi. L'eventuale residuo deve essere eliminato. Chiudere il flacone dopo l'uso. Conservare il flacone lontano da fonti di calore e comunque tra 5°C e 30°C. Per evitare contaminazioni, non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie. Non usare se il sigillo non è integro, in quanto non è garantita la sterilità del prodotto. Se le lenti a contatto rimangono per più di 24 ore nella soluzione, è necessario ripetere il trattamento con la soluzione Queen's Peroxide. Dopo la disinfezione risciacquare il contenitore portalenti e lasciare asciugare all'aria.

Il contenitore portalenti va sostituito ogni 30 giorni o comunque alla fine della durata del prodotto con uno nuovo presente nella nuova confezione di soluzione Queen's Peroxide. Usare sempre e solo l'apposito contenitore portalenti inserito nella confezione della soluzione Queen's Peroxide. Non togliere il tappo del contenitore portalenti durante la disinfezione delle lenti. Non usare il contenitore delle lenti con soluzioni diverse dalla soluzione Queen's Peroxide.

INDICAZIONI

La soluzione Queen's Peroxide è indicata per la disinfezione di tutti i tipi di lenti a contatto morbide con l'eccezione di quelle colorate/cosmetiche.

CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente. Non inserire mai le lenti negli occhi dopo averle bagnate con la soluzione Queen's Peroxide se non sono state sottoposte al processo di neutralizzazione con catalizzatore di metallo.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. NON INGERIRE. Non utilizzare mai acqua del rubinetto per il risciacquo delle lenti, ma usare sempre Queen's Saline o soluzione Queen's Unica. Consultare lo specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

COMPLICANZE

In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultate lo specialista.