

## QUEEN'S UNICA 500 ML

### PROPRIETA'

La soluzione multiuso Queen's Unica ha un elevato potere battericida ad azione antiproteica e ha un pH compatibile con i tessuti e con i liquidi oculari organici con cui viene a contatto. Molecole tensioattive, associate a polimeri altamente idratanti, ripristinano la bagnabilità e l'idratazione delle lenti morbide, assicurando un ottimo comfort e una migliore biotollerabilità.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare e risciacquare accuratamente le mani. Rimuovere la lente dall'occhio, posarla sul palmo della mano e versare una quantità di Queen's Unica sufficiente a bagnare completamente la lente. Sfregare delicatamente la lente con il dito, con un movimento verticale (in avanti e in dietro) per alcuni secondi. Al fine di rimuovere completamente i depositi superficiali, risciacquare abbondantemente e accuratamente la lente con la soluzione Queen's Unica. Ripetere la procedura sopra descritta per l'altra lente. Riempire il contenitore con la soluzione Queen's Unica. Chiudere accuratamente il contenitore portalenti e lasciare immerse le lenti per almeno 4 ore o per tutta la notte. Prima di applicare le lenti negli occhi risciacquarle con Queen's Unica. In caso di allergia o ipersensibilità specifica risciacquare con Queen's Salina.

### PRECAUZIONI

Il flacone di Queen's Unica una volta aperto deve essere utilizzato entro 60 giorni dall'apertura. L'eventuale residuo deve essere eliminato. Chiudere il flacone dopo l'uso. Conservare il flacone lontano da fonti di calore tra 5°C e 30°C. Per evitare contaminazioni, non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie. Non usare se il sigillo non è integro, in quanto non è garantita la sterilità del prodotto. Se le lenti rimangono nella stessa soluzione per più di 7 giorni, ripetere la procedura della detersione con Queen's Unica. Dopo la disinfezione e dopo aver applicato le lenti, risciacquare il contenitore portalenti con Queen's Unica e lasciarlo asciugare all'aria. Sostituire il contenitore portalenti ogni mese per diminuire il rischio di una sua contaminazione e quindi delle lenti. Non togliere i tappi del contenitore portalenti durante la disinfezione delle lenti. Eliminare sempre la soluzione rimasta dentro il contenitore portalenti.

### INDICAZIONI

La soluzione Queen's Unica è indicata per il risciacquo, la detersione, la disinfezione e come umettante delle lenti a contatto morbide.

### CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente.

### AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. **NON INGERIRE.** Non utilizzare mai acqua del rubinetto per il risciacquo delle lenti, usare sempre Queen's Saline, soluzione Queen's Unica o Queen's Uniyal. Consultare lo Specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti.

### COMPLICANZE

In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultate lo specialista. Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e/o astuccio.

**Non usare dopo la scadenza**

**Portalenti incluso**