

QUEEN'S I-FRESH YAL 20 ML

PROPRIETA'

Soluzione umettante Queen's I-FreshYal adatta per tutti i tipi di lenti a contatto, rinfresca e dona un senso di sollievo immediato e durevole. Queen's I-FreshYal ristabilisce l'idratazione delle lenti morbide e la bagnabilità delle lenti rigide gas-permeabili. Il sodio ialuronato ha elevate proprietà viscoelastiche, che migliorano la lubrificazione e biotollerabilità delle lenti.

ISTRUZIONI PER L'USO

Mettere alcune gocce di soluzione Queen's I-FreshYal sulle lenti e procedere all'applicazione. Se necessario, instillare direttamente nell'occhio più volte al giorno 1-2 gocce di prodotto.

PRECAUZIONI

Il flacone Queen's I-FreshYal, una volta aperto deve essere utilizzato entro 30gg. L'eventuale residuo deve essere eliminato. Chiudere il flacone dopo l'uso. Conservare il flacone lontano da fonti di calore e comunque tra 5°C e 30°C. Per evitare contaminazioni, non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie. Non usare se il sigillo non è integro, in quanto non è garantita la sterilità del prodotto.

INDICAZIONI

Queen's I-FreshYal è indicato, come soluzione lubrificante, durante l'applicazione di tutti i tipi di lenti a contatto. E' indicata in caso di occhi con scarsa lacrimazione o affaticati, oppure quando si ha la sensazione della presenza di un corpo estraneo.

CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. **NON INGERIRE.** Consultare lo specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti.

COMPLICANZE

In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultate lo specialista. Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e/o astuccio.